

CREAR MEJORES RESULTADOS CON PACIENTES

EL ARTE DEL OXÍGENO

Eclipse 3™

Sistema personal de oxígeno ambulatorio (PAOS)™

El sistema Eclipse 3 cumple por usted.

Rendimiento mejorado, beneficios médicos revolucionarios y accesorios innovadores llevan la nueva generación de Eclipse a nuevas cotas. Se trata de la solución total para su negocio del oxígeno,—ya que satisface las necesidades médicas y los deseos de los pacientes. Ya está aquí la tercera generación. El sistema total de oxígeno para necesidades las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Simple. El sistema Eclipse 3 es una solución única, mejor para sus pacientes y su negocio.

De confianza. Los pacientes quieren la libertad de disfrutar de la vida casi de inmediato y de la tranquilidad que ofrece la fiabilidad del sistema Eclipse 3. Es compatible con las distintas actividades de la vida diaria, al tiempo que cubre las necesidades de oxígeno individualizadas prescritas.

Probado. La AARC sugiere “valorar para saturar” y Eclipse se desarrolló con esa teoría en mente. Con una selección de dosis completa, un mayor espectro de la población puede recibir tratamiento mientras descansa, duerme, hace ejercicio o en altitud. Suministro de oxígeno superior.

CARACTERÍSTICAS:

- △ La tecnología autoSAT ayuda a mantener una FiO_2 constante mediante un servocontrol que regula el dispositivo para adaptarse a la frecuencia respiratoria cambiante de los pacientes.
- △ Aprobado para Rx de 0,5 - 3,0 LPM de flujo continuo
- △ Volúmenes de dosis de pulso desde 16 mL a 192 mL
- △ Pantalla LCD de dosis en mL y LPM
- △ Tres opciones de tiempos de subida disponibles—Rápido, Medio y Lento
- △ Configuración ajustable de sensibilidad de dosis de pulso
- △ Nuevo diseño de carro universal innovador que permite un mejor acceso a la batería
- △ Nuevos adaptadores de CA y CC más pequeños, pero más duraderos
- △ Paquete de alarma más fácil de usar
- △ En modo Dosis de pulso, si no se detecta un esfuerzo respiratorio, el dispositivo proporcionará un flujo continuo de oxígeno y buscará continuamente una respiración cada 15 segundos.
- △ Acceso fácil a información de mantenimiento y reparación



Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.


CAIRE®
SEQUAL®
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM



Eclipse 3

Sistema personal de oxígeno ambulatorio (PAOS)

Especificaciones del producto

Sistema de oxígeno Eclipse 3

Tamaño Al x An x La	49,0 x 31,2 x 18,0 (cm)
Peso	Eclipse 6,81 kg (15 libras), Carro de alimentación 1,54 kg (3,4 libras).
Ajuste de flujo continuo (medido en LPM)	0,5 a 3,0 LPM (incrementos de 0,5 litros)
Configuración de dosis de pulso (medido en mL)	16-96 mL, 128 mL, 160 mL, 192 mL
Concentración de O ₂	90 % ± 3 % al nivel del mar
Presión de salida de O ₂	5,0 psig (34,5 kPa) nominal
Nivel sonoro	48 dB(A) a 3,0 LPM en modo de flujo continuo; 40 dB(A) a 3,0 de dosis de pulso
Especificaciones energéticas: Funcionamiento con CA	100-240 V de CA, 50-60 Hz
Funcionamiento con CC	12V nominal
Carro de alimentación	Cantidad (2) paquetes de baterías de 97,5 W-Hr cada uno con 7,92 g de litio
Consumo energético:	52 vatios a 1,0 LPM CF, 145 vatios a 3,0 LPM, 45 vatios a 1,0 dosis de pulso, 95 vatios a 6,0 dosis de pulso
Tiempo de recarga del carro de alimentación nominal:	de 1,8 a 5,0 horas, en función del tiempo de recarga de flujo para lograr el 80 % de la capacidad
Alimentación de respaldo de la alarma	Batería de 9 voltios
Indicador de concentración de O ₂	Luz verde = normal, luz amarilla = advertencia o precaución, luz roja parpadeante = funcionamiento anormal
Temperatura de funcionamiento	de 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) a 28 °C (82,4 °F) punto de rocío, sin condensación
Sensibilidad de activación	Ajustable entre -0,125 cm H ₂ O y -0,40 cm H ₂ O
Rango de funcionamiento en altitud	0 - 4000 metros (0-13 123)
Alarmas/Alertas	Pérdida de potencia, Carro de alimentación baja, Baja salida de O ₂ terapéutico, flujo de O ₂ fuera de los límites normales No detección de inspiración en modo de dosis de pulso, funcionamiento incorrecto de la unidad

Información de pedidos

Descripción

Sistema de oxígeno Eclipse 3, Modelo 1000B, cable de alimentación de Norteamérica, manual en inglés

Número de pieza

5900-SEQ

NOTA: el sistema de oxígeno Eclipse consta de concentrador, carro de alimentación, fuente de alimentación de CA, fuente de alimentación de CC, paquete Eclipse y carro con asa telescópica.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107 (EE. UU.)
Teléfono 770.721.7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Teléfono +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245